

## Spirometriinställningar i Cardio Perfect

### Ställa in mätvärden spirometer:

### Gå in i Cardio Perfect:

- # Arkiv (vänster högst upp i listan)
- # Inställningar
- # Spirometri
- # Parametrar

Spara endast mätvärdena FVC, FEV<sub>1</sub>, FEV<sub>1</sub> %, SVC genom att bocka i kolumnerna mätvärden, sex parametrar och skrivare.

Alla andra bockar klickas bort.

- # OK (**Viktigt!** Annars sparas inte ändringarna)

### Granskning av spirometrikurvor:

### Gå in i Cardio Perfect:

- # All efforts (höger högst upp i listen), välj ”slutresultat” genom att klicka på pilen

### Då referenser saknas på gamla spirometrier:

### Gå in i Cardio Perfect:

- # Format vänster (högst upp i listen)
- # Omberäkna referensvärde, välj ”Hedenström/Solymar Com”
- # OK



# =  
klicka på